

COLDISEPT nanoSILVER aerosols kaklam

Medicīniskā ierīce – izsmidzināmais līdzeklis, kas palīdz baktēriju un vīrusu infekcijas izraisīta rīkles iekaisuma ārstēšanai.

COLDISEPT nanoSILVER aerosols kaklam uz rīkles gļotādas izveido aizsargslāni, aizsargājot to pret fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem faktoriem.

COLDISEPT nanoSILVER aerosols kaklam palīdz novērst pastāvīgu diskomfortu, mitrinot sausu rīkles gļotādu, tādējādi ievērojami samazinot iekaisuma simptomus, piemēram, sāpes un dedzināšanu. Produkts veido želejveida slāni, kas aizsargā mutes un rīkles gļotādu no baktērijām un vīrusiem.

Produktā esošais nātrijs, kālijs, kalcija un magnija minerālsāļu ūdens šķīdums attīra kaklu, mazina rīkles un deguna gļotādas pietūkumu un veicina kairinātas gļotādas atjaunošanos. Produkts satur sudraba nanodaļiņas, kas ierobežo baktēriju augšanu. Piparmētru eļļa palīdz iztīrīt deguna ejas, atvieglo klepu un uzlabo elpošanas komfortu.

SASTĀVS

Attīrīts ūdens, koloidālais nano-sudrabs, īru sarkano aļģu ekstrakts (karagināns), sorbīts, glicerīns, minerālsāļi (kālija dihidrogēnfosfāts, kālija hlorīds, nātrijs hlorīds, kalcija hlorīda heksahidrāts, magnija hlorīda heksahidrāts), piparmētru eļļa, nātrijs benzoāts, citronskābe.

INDIKĀCIJAS

COLDISEPT nanoSILVER aerosols kaklam ir efektīva papildu terapija šādos gadījumos:

- mutes un rīkles gļotādas iekaisums;
- mandeļu iekaisums;
- stāvoklis pēc mandeļu izoperēšanas.

BLAKUSPARĀDĪBAS

COLDISEPT nanoSILVER izsmidzināmā līdzekļa blakusparādības nav zināmas, tomēr īpaši jutīgiem cilvēkiem nevar izslēgt alerģijas simptomu rašanos. Ja rodas alerģiska reakcija, pārtrauciet produkta lietošanu.

PAPILDU INFORMĀCIJA UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Nelietojiet produktu, ja Jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām.

Nelietojiet produktu, ja Jums ir alerģija pret metālisko sudrabu.

Nepieļaujiet nejaušu nokļūšanu acīs.

Pārtrauciet produkta lietošanu, ja rodas jebkādi brīdinoši simptomi.

Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām!

Grūtnieces un bērni līdz 6 gadu vecumam drīkst lietot produktu tikai ārsta uzraudzībā.

Produktu var lietot ilgstoši bez atkarības, blakusparādību vai komplikāciju rašanās riska.

Par visiem nopietniem nevēlamiem notikumiem, kas radušies saistībā ar šīs medicīniskās ierīces

lietošanu, jāpaziņo ražotājam un pacienta dzīvesvietas valsts kompetentajai iestādei.
Kompetentā iestāde: Zāļu valsts aģentūra, Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003.

LIETOŠANA UN DEVAS

Lietojiet līdzekli 3-4 reizes dienā, atbilstoši individuālajām vajadzībām.
Pirms pirmās lietošanas nospiediet dozatoru vairākas reizes.
Novietojiet aplikatoru pēc iespējas dziļāk mutē un pavērsiet pret rīkles galu.
Izsmidziniet 3-4 devas (nospiežot dozatoru).

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C, sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojumā 20 ml